

moves 
STRETCHING
LIMITS

moves 
FIT
STRETCHING
LIMITS

Band



LATEX



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

mvs
IN
MOTION



MVS In Motion
Krommebeekpark II
8800 Roeselare
Belgium - Europe
www.mvs-in-motion.com


UK REP

Garad UK Ltd.
8 Northumberland Ave
Westminster, London WC2N 5BY
United Kingdom


CE MD UK
CA



Made in Malaysia

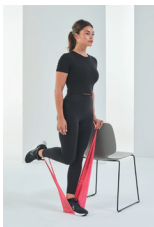

Combhajlító

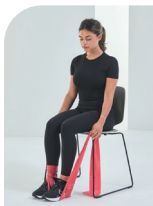


Combfesztő




Hajlító izmok



Széles hátizom és Teres minor

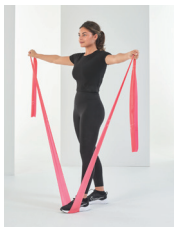


Deltoides

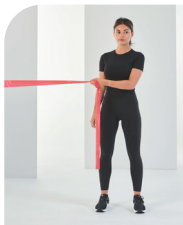

Deltoides



Mellizom

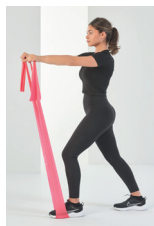

Deltoides és Mellizom

Mi a Snap-Stop®?

A Snap-Stop® sokkal biztonságosabbá teszi a latex szalagokkal való edzést. Ez az egyedülálló tulajdonság megakadályozza a hirtelen elszakadást, még akkor is, ha a szalag megsérül vagy beszakad. Az ellenállásos edzéshez használt szalagok rendkívül nagy erőknek vannak kitéve. Egy apró vágás is komoly következményekkel járhat. A Moves and Moves FIT szalagok egyedülállóak ebben a vonatkozásban.

Kiterjedt kutatás-fejlesztési munkánknek köszönhetően innovatív gyártási eljárást fejlesztettünk ki: megfelelő használat esetén a latex szalag nem szakad el hirtelen, még nagy erők hatására sem. Ez nem vonatkozik a nagyon régi szalagokra, a hosszabb ideig kültéren tárolt szalagokra, valamint a nem megfelelően használt szalagokra. Friss és tiszta szalag használata ajánlott. Minden használat előtt ellenőrizze a szalagot.

Snap-Stop® a biztonságos ellenállásos edzésért

Próbáld ki otthon:

1. Végezze egy kis bemetszést a Moves szalagon.
2. Nyújtsd meg a Moves szalagot.
3. Végezd el ugyanezt a tesztet egy másik márkájú szalaggal.
4. Csodálkozz...ez a Snap-Stop®!

