




perfectmama+




Használati utasítás
Kérjük, olvassa el figyelmesen

TensCare™

Gyorsindítási útmutató

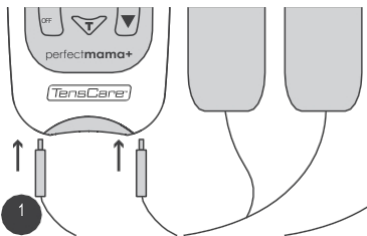


Csatlakoztassa a készüléket az elektródákhoz.

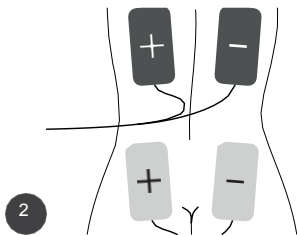


Helyezze az elektródákat a kezelendő területre.




A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

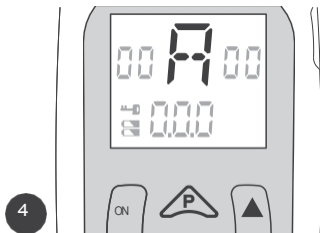

Válassza ki a programot a P gomb megnyomásával.

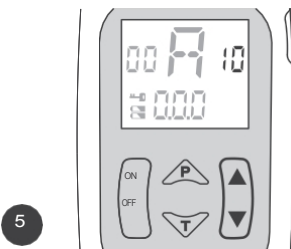

Kedje az edzést az intenzitás növelésével.

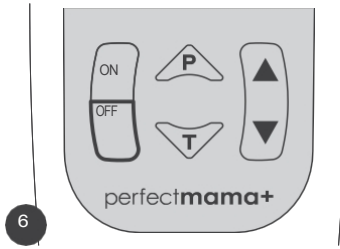

A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

Tartalom

1.	Készülék leírása	3
1.1.	Bevezetés	3
1.2.	Rendeltetés	3
1.3.	A készlet tartalma	3
1.4.	Kezelőszervek és kijelző	4
2.	Hogyan kell használni	4
2.1.	A készülék beállítása	4
2.2.	Könnyítés a szülés alatt	6
2.3.	Szülés után	9
2.4.	Alternatív felhasználási módok	10
3.	Hibaelhárítás	12
4.	Készülékápolás	13
4.1.	Tisztítás	13
4.2.	Tárolás	13
4.3.	Az akkumulátor cseréje	13
4.4.	Az elektróda és az ólomkábel ápolása	14
4.5.	Cserealkatrészek/kiegészítők	14
5.	Műszaki leírás	15

1. Készülék Leírás

1.1. Bevezetés

A Perfect mama+ egy klinikailag bizonyított, elektroterápiás stimulátor, amely a transzcután elektromos idegstimulációt (TENS) használja a szülés alatti gyógyszermentes fájdalomcsillapítás érdekében.

A készülék kis elektromos jeleket juttat a testbe a testen viselt, ragasztós elektródákon keresztül. Ezek a jelek stimulálják az idegeket, segítik a fájdalomjelek blokkolását és elősegítik az endorfinok, a szervezet természetes fájdalomcsillapítójának felszabadulását.

A Perfect mama+ a terhesség utolsó három hetében a hátfájás enyhítésére, valamint császármetszést, gátmetszést vagy episiotómiát követő műteti fájdalom csillapítására is használható.

Rendeltetésszerű használat esetén a Perfect mama+ a következő klinikai előnyöket biztosíthatja:

- A vajúdás alatti fájdalom csökkentése
- A műtét utáni fájdalom csökkentése
- A terhesség utolsó három hetében jelentkező hátfájás csökkentése

i Megjegyzés: Míg egyes várandós anyák úgy találják, hogy a Perfect mama+ önmagában elegendő fájdalomcsillapítást nyújt.

másoknak további enyhítésre lehet szükségük. A Perfect mama+ hatékonyan kombinálható más fájdalomcsillapítási lehetőségekkel, például gázzal és levegővel. Elektromos jellege miatt azonban nem használható vízben történő szülés során.

1.2. Rendeltetésszerű


A Perfect mama+-t otthoni egészségügyi és kórházi használatra tervezték. Környezetben a perinatális* és a szülés utáni időszakban jelentkező akut fájdalom tüneti enyhítésére és kezelésére szolgál, és mindenki számára alkalmas, aki képes a készüléket kezelni és megérteni az utasításokat.

A TENS a terhesség utolsó 3 hetében a hátfájás enyhítésére és a műtét utáni fájdalom enyhítésére is alkalmazható.

Ne használja a készüléket a javasolt felhasználáson kívül más célra.

i Megjegyzés: A perinatális időszak közvetlenül a szülés előtti és utáni időszak. A perinatális időszakot sokféleképpen határozzák meg. A meghatározástól függően a terhesség 20-28. hetében kezdődik és a születés után 1-4 héttel ér véget.

1.3. A készlet tartalma:

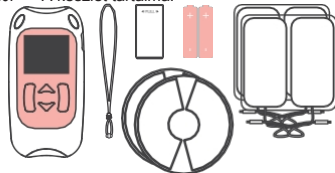

1x Perfect mama+ készülék

4 x 50x100 mm-es elektróda (E-CM50100-PM)

4 x mellelektroda párna (E-CMR60130) 2 x vezeték (L-CPT)

1 x Levehető óvszipesz


2 x AA elem

1 x nyakszín

1 x használati utasítás

1 x Tároló tasak

1.4. Vezérlők és kijelző

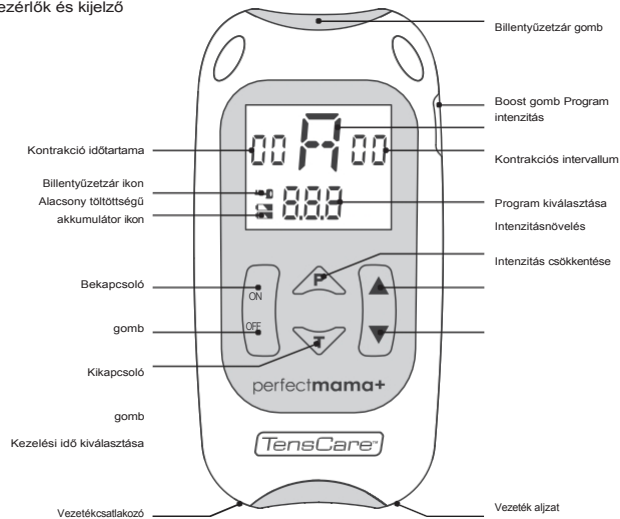


2. Hogyan kell használni

2.1. Készülék beállítása


Telepítse az elemeket

1. Távolítsa el a készülék hátoldalán lévő elemfedeleket.
2. Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy a pozitív (+) és negatív (-) végek illeszkedjenek a megfelelő csatlakozókhoz a rekeszben.

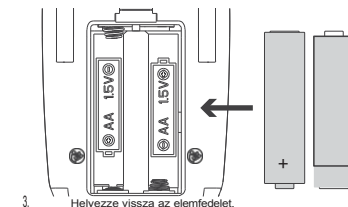

3. Helyezze vissza az elemfedeleket.

4. Az óvszipesz használatához csúsztassa az óvszipeszt a készülék hátsó csatornába.

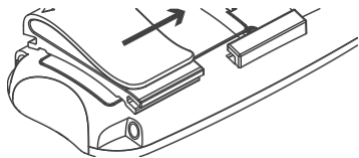


5. A nyakcsínör használatához hurkolja át a zsinórt a készülék tetején lévő egyik lyukon.

Csatlakoztassa a vezetékeket


1. Helyezze a vezeték fehér végét a készülék hátoldalán lévő csatmafoglatba.

2. Nyomja a vezetékhezalok fémtüskéit az elektródák aljzataiba.

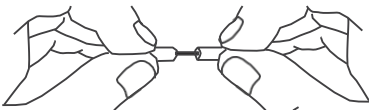


Helyezze el az elektródákat

1. Az elektródák felhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a bőre tiszta és száraz.
2. Vegye ki az elektródákat a műanyag bétésből.

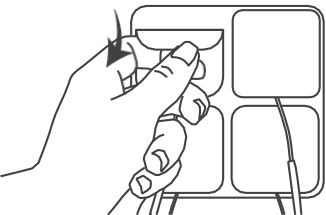

3. Helyezze a két elektródát a bal oldali aljzattól a gerincoszlop két oldalán, egymástól 5 cm távolságra és körülbelül 7,5 cm-re a lapockák alja alatt. Ez a terület éppen a melltartó vonala alatt van.
4. Helyezze a jobb oldali csatmához csatlakoztatott két elektródát a gerinc mindkét oldalán, egymástól kb. 10 cm távolságra és 2,5 cm-re a gerinc tövében lévő gödrcskek felett, közvetlenül a fenék felett.

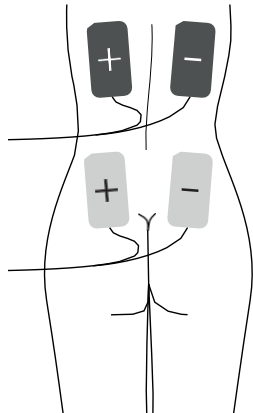

i Megjegyzés: Az elektródák felhelyezése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, vagy az intenzitás nulla.

Bekapcsolás / kikapcsolás

Kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gomb 3-5 másodpercig tartó lenyomásával.

Kapcsolja ki a készüléket a kikapcsoló gomb 3-5 másodpercig tartó lenyomásával.

i Megjegyzés: A készülék automatikusan kikapcsol, ha az intenzitás beállítása több mint 5 percig nulla értéken marad.

2.2. Enyhítés biztosítása a vajúdás során

A zülés kezdete


A Perfect mama+ három különböző, a vajúdás különböző szakaszaira szabott programmal rendelkezik.

Akkor kezdje el használni a Perfect mama+ készüléket, amikor a fájások rendszeresé válnak.

Kezdje az "A" programmal. Ha az "A" még nincs kiválasztva, nyomja meg a "P" gombot a programok közötti váltáshoz. A képernyőn egy villogó "A" fog megjelenni.




Az "A" programot az összehúzódasok között kell használni.

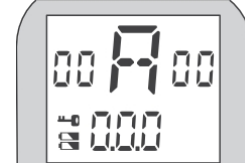

Intenzitás kiválasztása

Növelje az intenzitást a ▲ gomb megnyomásával.

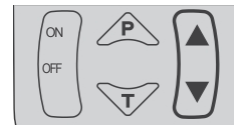

Az "A" programban 50 intenzitási szint áll rendelkezésre.

A ▲ és ▼ gombok minden egyes megnyomásával az intenzitás 1mA-rel módosítható. Az intenzitás gyorsan növelhető vagy csökkenthető a ▲ ▼ gombok nyomva tartásával.

Az ingerlés pulzáló érzést fog okozni. Alacsony intenzitási szinteken gyakran előfordul, hogy nem érezhető érzés. Állítsa be az intenzitást, amíg az érzés erős, de kényelmes nem lesz.

A használat során további emelésekre lehet szükség, ha a teste hozzászokik az érzéshez, vagy ha a fájdalomkiből eredő fájdalom erősödik.

i Megjegyzés: Észreveheti, hogy a felső elektródák erősebb stimulációt biztosítanak, mint az alsók. Ez szándékos és a terápia része. Ha az alsó elektródáknál erősebb stimulációt érez, cserélje ki a vezetékeket a készülék aljzatában.

i Megjegyzés: Az intenzitás nem növelhető, ha a készüléket nem megfelelően csatlakoztatták a testhez (pl. zárt áramkör van kialakítva). Ha a Perfect mama+ bármelyik csatmórán megszakadt a kapcsolat, automatikusan nullára állítja vissza az erősséget, és a CH1, CH2 és 00 villogni fog. Az intenzitás növeléséhez győződjön meg arról, hogy az elektródák

megfelelően csatlakoztatva legyenek a testhez és a készülékhez.




Figyelmeztetés: Amikor a csatornák kimeneti aljzatában lévő sárga LED-ek világítanak, ez azt jelzi, hogy az ingerlés intenzitása elég magas ahhoz, hogy káros legyen, ha nem megfelelően használják. Kérjük, óvatosan használják.

Összehűződések alatt

Összehűződések alatt, amikor a fájdalom fokozódik, az ingerlés fokozható.

Nyomja meg a BOOST gombot a készülék oldalán az összehűződés kezdetén. A képernyőn folyamatosan az "A" betű jelenik meg, és átvált "A BOOST" üzemmódba.

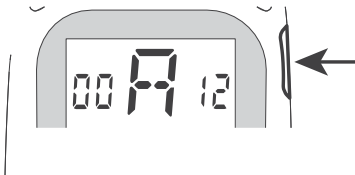


Ez az ingerlés pulzálóról állandóra változik, ami segít enyhíteni a fájdalmak alatti fokozott fájdalmat.

Az összehűződés végén nyomja meg újra a B O O S T gombot, hogy visszatérjen az "A" programhoz.

Ha az összehűződések erősödnek és gyakoribbá válnak

Használja az "A" és az "A BOOST" programot, ameddig csak lehetséges.

Amikor az összehűződések intenzívebbé és gyakoribbá válnak, a P gomb megnyomásával válton a "B" programra.

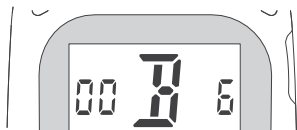

A "B" program olyan stimulációs mintát használ, a m e l y a fokozott fájdalom blokkolására szolgál. Az előzőkhez hasonlóan ezt a programot is használja a fájások között.

Az intenzitást 50%-kal csökkentjük, hogy elkerüljük a hirtelen megnövekedett ingerlést, amely kellemetlenséget okozhat.

Növelje az intenzitást a ▲ gomb segítségével, amíg az érzés erős, de kényelmes nem lesz.

A "B" programban 50 intenzitási szint áll rendelkezésre.

Ahogy az összehűződések egyre intenzívebbé és szorosabbá válnak, növelje tovább az intenzitást.

Az összehűződések alatti stimuláció fokozásához ismét nyomja meg a BOOST gombot, amikor az összehűződés megkezdődik, h o g y á t k a p c s o l j o n a "B BOOST" programra. A képernyőn folyamatosan a 'B' betű jelenik meg.

Amikor az összehűződés véget ér, nyomja meg újra a BOOST gombot, hogy visszatérjen a B programra.

A terhesség utolsó szakaszában

H a a fájdalom tovább erősödik, és az A és B program nem elegendő, nyomja meg a P gombot, hogy átkapcsoljon a C programra.



A programváltáskor az intenzitás ismét 50%-kal csökken, hogy elkerülhető legyen a hirtelen megnövekedett stimuláció, amely kellemetlenséget o k o z h a t .

Növelje az intenzitást a ▲ gomb segítségével, amíg az érzés erős, de kényelmes nem lesz. A C programban 60 intenzitási szint áll rendelkezésre.

Ebben az üzemmódban, amikor az összehűződések megkezdődnek, n y o m j a m e g és tartsa lenyomva a BOOST gombot. Ez növeli az intenzitást, amíg a BOOST gombot fel nem engedi, további rövid ideig tartó, intenzív fájdalomcsillapítást biztosítva.



Megjegyzés: Engedje el a BOOST gombot, ha az ingerlés túl intenzív és fájdalmat okoz.

A BOOST gomb felengedése után az intenzitás visszatér a BOOST gomb megnyomása előtti korábbi beállításra.

Ha az intenzitás csökken, ismét megnyomhatja és lenyomva tarthatja a BOOST gombot, hogy az intenzitás ezen a szinten maradjon az összehűződés végéig.

Összehűződés időzítő

A Perfect mama+ kijelzi az összehűződésekre vonatkozó információkat, hogy Ön és szülésznője jobban megértse, hogyan halad a vajúdás.

A fájások alatt a képernyő


automatikusan megjeleníti az utolsó összehűződés időtartamát és az utolsó két összehűződés közötti időtartamot.

Az összehűződési időzítő bekapcsolásához tartsa lenyomva a T és ▲ gombokat 3-5 másodpercig.

Az összehűződési időzítő kikapcsolásához tartsa lenyomva a T és ▼ gombokat 3-5 másodpercig.

Utolsó összehűződés időtartama (másodpercben)

Kontrakciós intervallum (percben: másodpercekben)

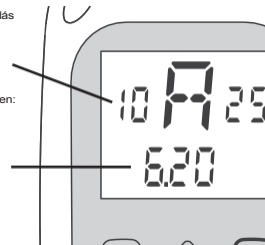

Kontrakció időtartama

Az utolsó összehűződés időtartamát mutatja másodpercben kifejezve.

Az időzítő akkor indul, amikor a BOOST gomb megnyomásával állandó üzemmódba (A BOOST vagy B BOOST) vált.

Az időzítő leáll, amikor újra megnyomja a BOOST gombot.

A C programban az időzítő akkor indul, amikor megnyomja és lenyomva tartja a BOOST gombot, és akkor áll m e g , amikor a készülék visszatér az eredetileg kiválasztott intenzitáshoz.

Ha az összehűződés 30 másodpercnél tovább tart, a kijelző 30 percig villogni fog, jelezve, hogy az aktív vajúdás megkezdődött.

Összehűződési intervallum

Az időtartamot mutatja percben és


másodpercen az utolsó két összehúzódság kezdete között.

Ha az összehúzódságok között kevesebb mint 5 perc van, a kijelző 30 percig villog, jelezve, hogy az aktív szülés megkezdődött.

Billentyűzár

A billentyűzetet le lehet zárni a beállítások véletlen megváltoztatásának elkerülése érdekében.

A készülék zárolásához tartsa lenyomva a billentyűzet gombot három másodpercig.

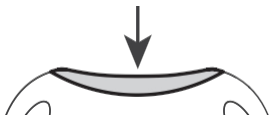

A képernyőn megjelenik a zár ikon.



A készülék feloldásához tartsa lenyomva a billentyűgombot.

i Megjegyzés: Az intenzitás csökkenthető a ▼ gomb megnyomásával, miközben a készülék le van zárva.

Alacsony akkumulátor töltöttség

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, az akkumulátor ikonok jelennek meg a képernyőn. A készülék 2 perc elteltével automatikusan kikapcsol.



Cseré

2.3. A munka után

A készülék leválasztása

Miután a vajúds és a tehermentesítés már nem szükséges, kapcsolja ki a készüléket a kikapcsoló gomb 3-5 másodpercig történő megnyomásával.

Távolítsa el az elektródákat a bőrről a párna megfogásával és óvatosan húzással. Ne húzza meg az ólomkábeleket.


Helyezze vissza az elektródákat a műanyag bélésre. Csatlakoztassa le a vezetékkeket a készülékről.

Helyezze az elektródákat az újjazárható műanyag zacskóba.

Tegye vissza a készüléket és az elektródákat a tároló tasakba.

Ha azt tervezi, hogy a Perfect mama+ készüléket a következő babához tárolja, akkor tegye a következőket:

- Vegye ki az elemeket
- Tisztítsa meg a 4.1. szakaszban leírtak szerint.
- Tárolja vagy dobja ki a beépített vezetékkel ellátott elektródákat.

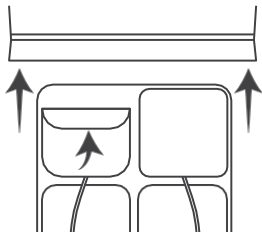

- Ne felejtse el új elektródákat és elemeket vásárolni, mielőtt újra használni szeretné a Perfect mama+ készüléket.

A vajúds ideje

Ha látni szeretné, hogy mennyi ideje használja a Perfect mama+ készüléket, nyomja meg a T gombot.



A képernyőn megjelenik a T betű. A vajúds ideje órákban és percekben jelenik meg.



A képernyő 3 másodperc múlva visszaáll a normál állapotba.


A vajúdsi idő kézzel történő nullára állításához nyomja meg a T gombot 5 másodpercig. Az idő automatikusan nullára áll vissza, ha a Perfect mama+ több mint 2 órán keresztül ki volt kapcsolva.

2.4. Alternatív felhasználási lehetőségek

Hátfájás a szülés előtt

A Perfect mama+ a terhesség utolsó három hetében használható a hátfájás enyhítésére.

Helyezze fel az elektródákat a fájdalommal járó terület körül, az elektródapárokat a következők szerint elhelyezve:

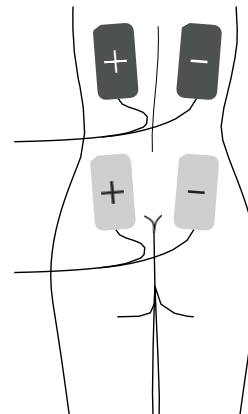


Kezdje az A programmal, és használjon különböző programokat és/vagy BOOST üzemmódokat, ha további enyhítésre van szükség.

Szülés utáni fájdalom a szülést követően

A TENS-stimuláció alkalmazható a műtét utáni fájdalom enyhítésére.

Helyezze el az elektródákat a hüvely mindkét oldalán, az alábbiak szerint:

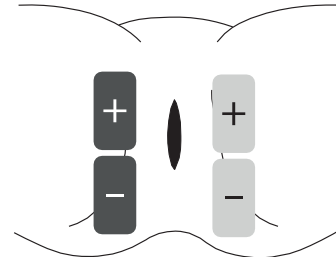

Kezdje az A programmal, és használjon különböző programokat és/vagy BOOST üzemmódokat, ha további enyhítésre van szükség.



Figyelmeztetés: Mielőtt a Perfect mama+-t erre a célra használná, kérjük, hogy

Konzultáljon a szülésznőjével vagy orvosával.


Fontos az óvatosság, ha a TENS készüléket műtéti beavatkozások után használja, mivel az ingerlés zavarhatja a gyógyulási folyamatot.

A szoptatás beindításához

Az "A" program mellelektrodákkal (E-CMR60130) használható, alkalmas a szoptatás beindítására.

Helyezzen egy pár elektródát mindkét mellre, 1-2 cm-re a mellbimbótól, a mellbimbó ellentétes oldalára.

Csatlakoztassa mindkét mell mindkét elektródát ugyanahhoz a TENS-csatornához (az egyiket a piros, a másikat a fekete csatlakozóhoz).

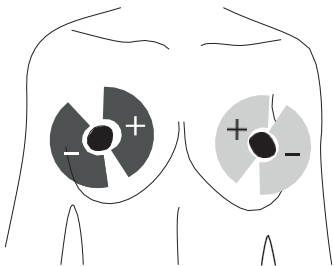

Kétóránként 15 percig használja.

A TENS stimulálja a mellben lévő érzékelő idegeket, a csecsemő szopását utánozva (percenként több mint 100-szor). Ez segíthet

a szervezetében prolaktint, a szoptatáshoz szükséges hormont termeljen. Használat közben enyhe bizsergést kell éreznie.

Amint a tejtermelés megkezdődik, ne használja a TENS-t a rendszeres pumpálás helyettesítésére.

Vagy szoptatás közben. Használja a TENS-t kiegészítő stimulációként a szoptatás támogatására, például éjszaka vagy extra pumpálások során.



Figyelmeztetés: Ezek a párnák nem orvosi problémák kezelésére szolgálnak,

kérjük, konzultáljon a szülésznőjével vagy

orvos.

3. Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, használja az alábbi hibaelhárítási útmutatót.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A kijelző nem kapcsol be	Lemerült akkumulátorok.	Cserélje ki az elemeket.
	Az elemek rosszul vannak behelyezve.	Távolítsa el a műanyag fóliát. Ellenőrizze, hogy a pozitív és negatív végek helyesen vannak-e elhelyezve.
A vezérlők nem működnek	A billentyűzet le van zárva.	Ha a billentyűzet ikonja jelenik meg, nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercig a reteszelő gombot.
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint kijelzése	Alacsony töltöttségű akkumulátorok.	Cserélje ki az elemeket.
A kimenet nem működik	Nyitott áramkörhöz vezetős csatlakozási hibák	Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően van a testhez csatlakoztatva.
Nincs érzés	Az intenzitás nem elég erős.	Növelje az intenzitást. A legtöbb felhasználó 10 mA alatti beállításnál érez valamit.
Hirtelen változás az érzésben	Ha leállítja az ingerlést, és néhány perc múlva folytatja, a jel sokkal erősebbnek fog tűnni.	A vezetékek vagy az elektródapárnák leválasztása után mindig állítsa vissza az intenzitást nullára.

Ha nem tudja megoldani a problémát, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:

Email: customer.service@tenscare.co.uk Telefon: +44 1372 723434

Megjegyzés: A Perfect mama+ nem rendelkezik alapvető teljesítményjellemzőkkel. A készülék meghibásodása nem



nem okoz elfogadhatatlan klinikai kockázatot a felhasználó számára.



Megjegyzés: Ha a felhasználó képes bekapcsolni a készüléket, növelni és csökkenteni az intenzitást, váltani mindhárom program között, és aktiválja a Boost üzemmódot minden programban, ez megerősíti, hogy a készülék a gyártó által tervezett módon működik.

4. Készülék Ápolás

4.1. Tisztítás

A készüléket és a vezetékeket legalább hetente egyszer nedves ruhával, enyhé szappanos-vizes oldattal áttörölve tisztítsa meg. Törölje szárazra.

- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A szappanon és vízen kívül ne használjon más tisztítószert.

4.2. Tárolás

Használatok között fontos, hogy az elektródákat a visszazárható műanyag zacskóban, a zacskót lezárva tárolja. Ez segít meghosszabbítani az elektródák élettartamát.

A készüléket és az összes tartozékot a tároló tasakban tartsa a használat közötti időszakban.

Tárolási élettartam

- Az öntapadós elektródapárnák bontatlan csomagjának tárolási ideje 4 év. Ezt befolyásolhatja a nagyon magas hőmérséklet vagy a nagyon alacsony páratartalom.
- A készüléknek nincs rögzített eltarthatósági ideje.
- A fel nem használt elemek névleges eltarthatósági ideje 3 év, de általában ennél tovább tart.

4.3. Az akkumulátorok cseréje

Ha az elemek lemerültek és a kijelzőn megjelenik az elem ikon, cserélje ki az elemeket.

Az elemeknek legalább 30 órán át kell működniük, ha

"A" program használatra 40 mA-en.

A készülék újratölthető elemekkel is működik, de a kijelző

homályos lehet.  Akkumulátor figyelmeztetések

- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha nem valószínű, hogy hosszabb ideig fogja használni. Egyes típusú elemekből maró folyadék szivároghat.
- Ne szűrje át, ne nyissa fel, ne szedje szét, és ne használja nedves és/vagy korrozív környezetben.
- Ne tegye ki 60°C(140F) feletti hőmérsékletnek.
- Ne tegye, tárolja vagy hagyja hőforrások közelében, közvetlen erős napfényben, magas hőmérsékletű helyen, nyomás alatt lévő tartályban vagy mikrohullámű sütőben.
- Ne merítse vízbe, és ne ázzon el.
- Ne zárja rövidre.
- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha az elemfedél a helyén van.
- Ha az akkumulátor szivárog, és bőrrel vagy szemmel érintkezik, alaposan mossa le bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Tartsa az elemeket gyermekek számára elérhetetlen helyen, nehogy véletlenül lenyeljék azokat. Ha a gyermek lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz.
- Soha ne próbálja meg újratölteni az alkáli elemet. Robbanásveszély.
- Ne keverje össze a régi, új vagy különböző típusú

elemeket, mivel ez az elem szivárgásához vagy az elem alacsony töltöttségének jelzéséhez vezethet.

- Eltávolítás: Az elemeket és a készüléket mindig felelősségteljesen ártalmatlanítsa a következők szerint a helyi kormányzati irányelveknek megfelelően. Ne dobja az elemeket tűzre. Robbanásveszély.

4.4. Az elektróda és az ólomhuzal ápolása

- Az elektródák újrafelhasználhatóak, de csak egy betegnél használhatók. Az elektródáknak legfeljebb 20 használatot kell biztosítaniuk. Ez a bőr állapotától, a páratartalomtól és a két használat közötti tárolástól függően változhat.
- Az elektródák élettartamának maximalizálása érdekében mindig gondoskodjon arról, hogy az elektródákat visszahelyezze a műanyag belésükre, és a műanyag zacskóban tárolja és zárja le. Ha az elektródák kiszáradnak, az negatívan befolyásolhatja a kezelés teljesítményét.
- Az elektróda ragasztója egy lehúzóható hidrogél (vízbázisú). Az elektróda ragadós állapotának visszaállításához adjon hozzá a g y apró csepp vizet, és kenje szét. Kerülje a túl sok hozzáadását, mert az elektróda túl puha lesz 1 ó l e . Ha ez bekövetkezik, helyezze az elektródákat ragadós oldattal fellelő néhány órára hűtőszekrénybe, hogy visszanyerjék tapadóságukat.
- Cserélje ki az elektródákat, ha elvesztik ragadós voltukat. A rossz csatlakozás kellemetlen érzést és bőrirritációt okozhat.
- A biztonság és a hatékonyság érdekében kizárólag a TensCare elektródák használatát javasoljuk.

- Az ólomvezetékek élettartama nagyon függ a használatától. Mindig óvatosan kezelje a vezetékeket. Javasoljuk, hogy az ólomvezetékeket rendszeresen (körülbelül 6 havonta) cserélje ki.

4.5. Cserealkatrészek/ tartozékok

A következő cserealkatrészek kompatibilisek a Perfect mama+ készülékkel, és megrendelhetők a TensCare-től a www.tenscare.co.uk vagy a +44(0) 1372 723434 címen.

E-CM50100-PM	50x100 mm-es elektródák integrált vezetékkel (4 db-os csomag)
E-CMR60130	Mellelektrodák (2 páras csomag)
L-CPT	Vezetékhuza
B-AA	AA elemek (2 darabos csomag)

5. Műszaki specifikáció

Hullámforma	Szimmetrikus kétfázisú
Amplitúdó (1 kOhm terhelés felett)	75,0 mA nulláról csúcsértékre, 50 lépés A-ban és B-ben, 60 lépés C-ben +/- 10%
Frekvenciatartomány	80-150Hz
Impulzusszélesség-tartomány	150-250us
Kimeneti csatlakozó	Teljesen árnyékolt: érintésbiztos
Csatornák	Kétsatornás
Tápegység	2 x AA alkáli (két AA elem)
Súly	75 g (elemek nélkül)
Méreték	120 x 60 x 20 mm
Biztonsági besorolás	Belső áramforrás. Folyamatos használatra terveztek. Nincs speciális nedvességvédelem.
Élettartam	>5 év
Alkalmazott rész	Bőrfelületi elektródák
Alkalmazott rész osztályozás	BF típus
IP-besorolás	IP22
Környezeti specifikációk	
Üzemi feltételek	Hőmérséklet-tartomány: Páratartalom: 15-90% relatív páratartalom, nem kondenzálódik Légköri nyomás: 700 hPa és 1060 hPa között
Tárolási feltételek	Hőmérséklet-tartomány: -25 és +60°C között Páratartalom: 15 és 90% RH nem kondenzálódó légköri nyomás: 700 hPa és 1060 hPa között.

Köszönjük, hogy használta a Perfect mama+...

A TensCare-nél arra törekszünk, hogy a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk. Nagyra értékeljük visszajelzéseit, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy továbbfejlesszük kínálatunkat. Fontos számunkra annak megértése, hogy termékeink milyen előnyökkel járnak az Ön számára. Ha bármilyen meglátása vagy javaslata van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvétel



TensCare Ltd.
9 Blenheim Road,
E p s o m , Surrey, KT19
9BE, Egyesült
K i r á l y s á g .



+44 (0) 1372 723434



www.tenscare.co.uk



customer.service@tenscare.co.uk

Kövessen minket



TensCare Ltd.



@tenscareltd



@TensCareLtd



TensCare Limited

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A TensCare Ltd. ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel az (EU) 2017/745 RENDELET rá vonatkozó rendelkezéseinek. Az orvostechnikai eszköz az (EU) 2017/745 RENDELET IV. melléklete szerint a IIa osztályba sorolták. Az érintett terméket az (EU) 2017/745 RENDELET IX. mellékletének megfelelő minőségirányítási rendszer szerint tervezték és gyártották. Ezt az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki. Nem alkalmazandó "közös előírás".





www.tenscare.co.uk



TensCare Ltd.
9 Blenheim Road, Epsom, Surrey, KT19 9BE,
Egyesült Királyság.



EU DoC
Megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló (EU)
2017/745 rendeletnek.



Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2. emelet, Tower
Street, Swatar,
BKR 4013, Málta



TensCare Europe BV
Beukenlaan 23-033,
1701 DA, Heerhugowaard, Hollandia.