

ZENOWELL LUNA

Rövid útmutató




Útmutató videó



Kérdések esetén


kapcsolat: support@zenowell.ai

1. lépés: Nedvesítse meg a fül dugót géllal vagy vízzel

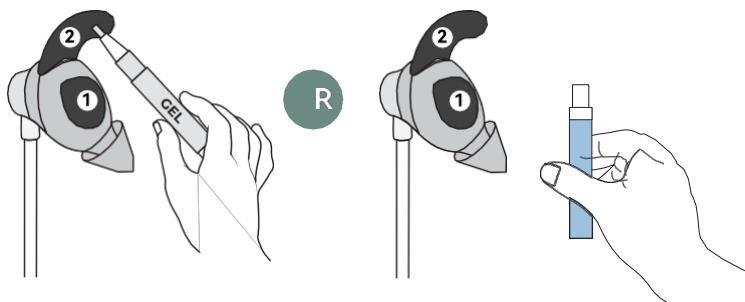


2. lépés: Helyezze fel a fül dugót

[Ha viszonylag nagy fülei vannak, egyszerűen helyezze a fül dugót a bal fülébe

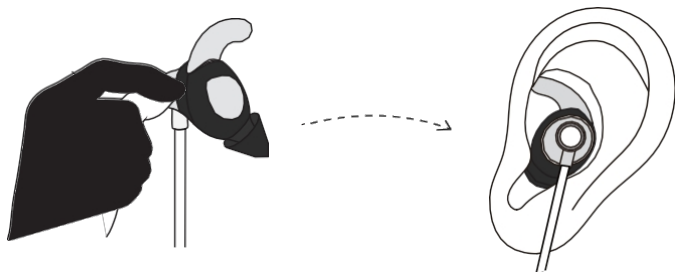


- **Megjegyzés:** Ha viszonylag kicsi a füle, vegye le a szilikon kupakot, mielőtt a fül dugót a bal fülébe helyezi.

(A szilikon kupak nem befolyásolja az áramimpulzust)

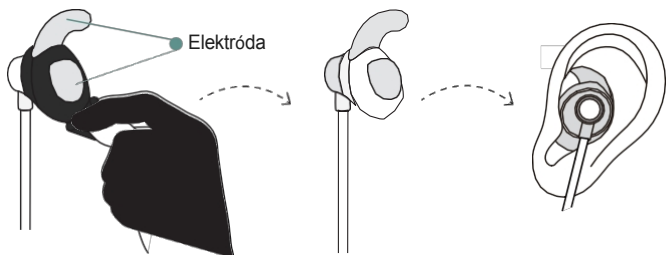

3. lépés: Állítsa be a fül dugót, hogy megbizonyosodjon a helyes elhelyezésről

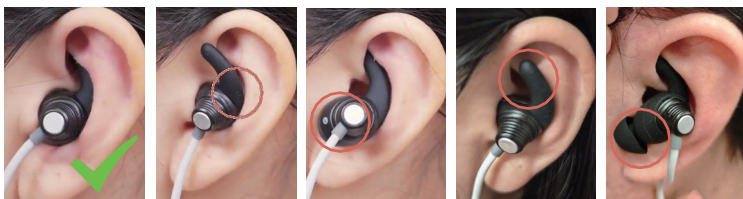

- Az első használat során enyhe bizsergést érezhet.


Ha szúrást vagy fájdalmat érez, az az elektródák rossz érintkezésének tudható be.

Kérjük, olvassa el az 1. lépést az elektródák újbóli nedvesítéséhez, vagy a 3. lépést a pozíciójuk beállításához.

- Ha nem érez semmilyen stimulációt, lehetséges, hogy a szilikon borítás megakadályozza az elektródák megfelelő érintkezését a bőrrel. Próbálja meg eltávolítani, és állítsa be újra a fül dugót.

4. lépés:

Válasszon ki egy üzemmódot, és állítsa be az intenzitást.

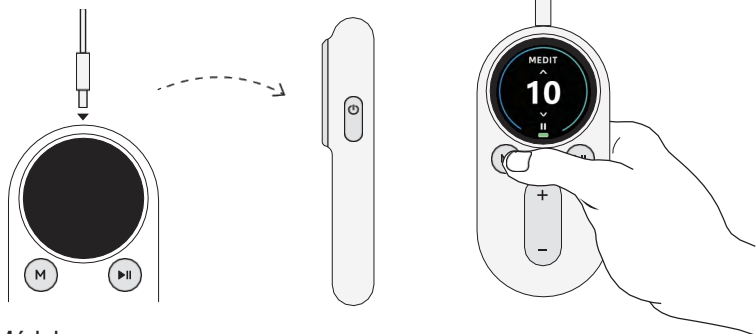

Módok



**ALVÁS
MÓD**

IÁLMATLANSÁG
Alvászavar

- Daily use to improve sleep quality



**RELAX
MODE**

stressz, szorongás
vagy gyomor-bélrendszeri
problémák

- During stressful moments
- After work to unwind
- Napi használat a 9 leggyakoribb gyomor-bélrendszeri probléma szabályozására



**MEDIT
MODE**

Testi fájdalom, fáradtság
vagy gyulladás

- When feeling body tension or discomfort
- While resting or meditating
- Daily use to reduce inflammation




**RELIEF
MODE**

Fejfájás


- Daily use to prevent headache attacks

Gyors elektródateszt

Ha nem biztos abban, hogy a készülék működik-e, vagy nem érez stimulációt a fülén, próbálja ki ezt a gyors tesztet:

Tesztelje kézzel 

- Válassza az ALVÁS módot.
- Ugyanazon kéz két ujjával érintse meg egyszerre az 1. és 2. elektródapontot.

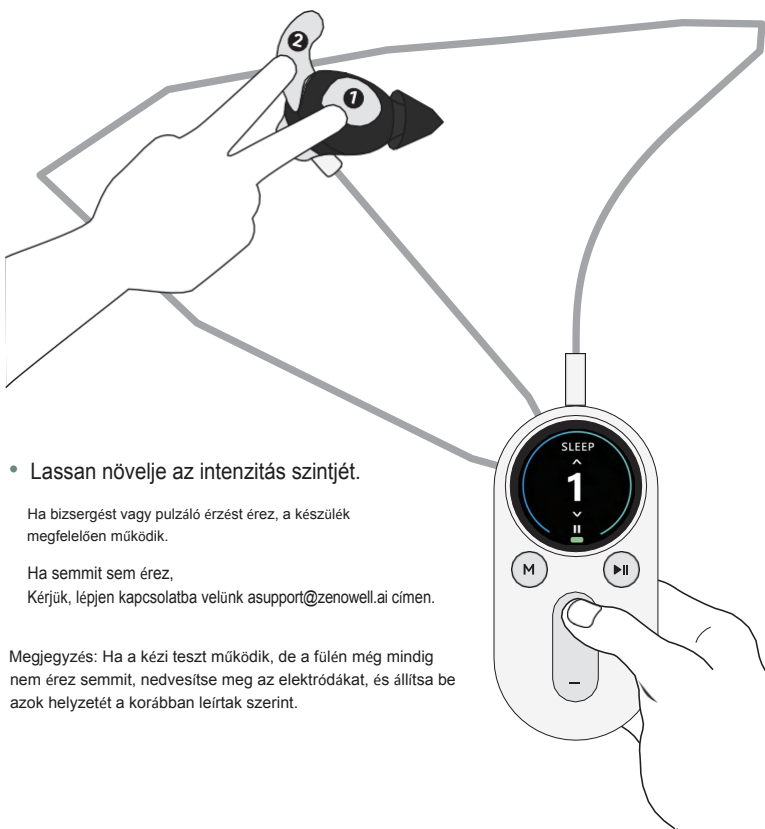

- Lassan növelje az intenzitás szintjét.

Ha bizsergést vagy pulzáló érzést érez, a készülék megfelelően működik.

Ha semmit sem érez,

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk asupport@zenowell.ai címen.

Megjegyzés: Ha a kézi teszt működik, de a fülén még mindig nem érez semmit, nedvesítse meg az elektródákat, és állítsa be azok helyzetét a korábban leírtak szerint.

EN A/0 verzió

Aurikuláris stimulátor használati útmutató

A100-I



Szkennelje be a többnyelvű
utasítások letöltéséhez

2025. május 15.

ZENOWELL LIMITED

Bevezető

Tisztelt Felhasználók! Őszintén köszönjük, hogy termékünket, az aurikuláris stimulátort választották! Ez a füzet fontos biztonsági, szabályozási és jótállási információkat tartalmaz, amelyeket az aurikuláris stimulátor használata előtt el kell olvasniuk.

Aurikuláris stimulátor készlet

A csomag tartalma:

- Műszaki tok
- Aurikuláris stimulátor
- Füldugó szilikon borítással
- Vízpermet
- Gélkefe
- Töltőkábel
- Felhasználói kézikönyv
- Termék használati utasítás
- Brosúra



Óvintézkedések

- A füldugót szorosan, egyenletesen kell a fülhöz illeszteni.
- Kerülje a füldugó használatát sebekben, hegeken, zúzódásokon, horzsolásokon, friss hegeken, vágásokon vagy gyulladt bőrön. Tilos a készüléket olyan fülbőrön használni, amelyet érzékszervi rendellenességekkel.
- A füldugót használat közben nem szabad a szív elé vagy mögé helyezni.

A fül dugó mellkas közelében történő használata növelheti a szívfibrilláció kockázatát.

- Ne használja a fülhallgatót fürdés közben.
- Ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa ezt a terméket saját kezűleg.
- A készülék használata tilos pacemakerrel vagy beültethető életfenntartó orvosi eszközökkel rendelkező betegek számára. Terhes nők, rendellenes bőrirritációval, szívbetegséggel, akut egészségügyi problémákkal, rosszindulatú daganattal küzdő, illetve orvosi kezelés alatt álló személyeknek a használat előtt orvoshoz kell fordulniuk.
- A termék töltőjét olyan adapterrel kell ellátni, amelyek kimeneti teljesítménye nem haladja meg a 15 W-ot.

Aurikuláris stimulátor használati utasítása

Külön **termékhasználati** útmutatót is kínálunk, amelyben további részleteket találhat.

Az aurikuláris stimulátor négy üzemmóddal rendelkezik: SLEEP, MEDIT, RELAX és RELIEF.

1. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az aurikuláris stimulátor teljesen feltöltődött. Csatlakoztassa a töltőkábelét a készülékhez, és ellenőrizze, hogy a kijelzőn az akkumulátor teljes feltöltöttséget jelzi-e.
2. Helyezze be a fül dugó vezetékét az aurikuláris stimulátorba.
3. A fül dugó elhelyezésének útmutatója:
 - a) Tartsa lenyomva a jobb gombot a készülék bekapcsolásához, majd helyezze be a fül dugót a csatlakozóba.
 - b) Alkoholos vagy nedves törölkendővel törölje le a bal fülét, hogy kissé nedves maradjon.
 - c) Töltse fel a spray-palackot vízzel. Tartsa a spray-t körülbelül 10 cm-re a fül dugótól. Vagy használhatja az ecsetet is a gél felviteléhez a fül dugóra.

- d) Óvatosan helyezze a fülhallgatót a bal fülére, majd helyezze be a fülébe a fülhallgatót.
- e) Állítsa be a fül dugót úgy, hogy biztonságosan illeszkedjen a célterületekhez (azaz a termék használati utasításában kék színnel kiemelt területekhez).
- f) Ha a fül dugó (szilikon borításával) túl nagy a bal füléhez, kérjük, vegye le a szilikon borítást. Győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik a fülébe, és hogy érzi a stimulációt.
- g) Rögzítse a fül dugó vezetékét ruhájához egy kapcs segítségével, hogy megakadályozza a fül dugó leesését.



A fül dugó viselésének illusztrációja

- 4. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot az aurikuláris stimulátor bekapcsolásához, majd válassza ki a megfelelő módot az „M” gombbal.
- 5. Állítsa be az aurikuláris stimulátor intenzitási szintjét:
 - a) Lassan növelje az intenzitást a „+” vagy „-” gombok megnyomásával. Ügyeljen arra, hogy ne siesse el ezt a folyamatot. Ha nem érez semmit, segíthet, ha egy kis nedvességet csepegtet a fülébe. Azonnal álljon le, ha éles szűrő érzést érez.
 - b) Állítsa be az intenzitást, amíg kellemes és viszonylag erős

bizsergést vagy rezgést érez, de fájdalom vagy szúró érzés nélkül. Ha fájdalmat érez, azonnal csökkentse az intenzitást. Ha az érzés éles, állítsa be a fül dugó helyzetét.

- c) Minden felhasználó preferált szintje eltérő, és a nagyobb intenzitás nem feltétlenül jobb.
 - d) Amint az intenzitás 0 felett van, a készülék elkezd a működést.
6. Az aurikuláris stimulátor készüléke most aktív, és a kezelés megkezdődött. Ezt a képernyőn megjelenő visszazámláló jelzi.
7. A kezelési idő letelte után az aurikuláris stimulátor automatikusan kikapcsol, ha 3 percnél hosszabb ideig nem történik művelet.

Mód kiválasztása

Válasszon a különböző módok közül:

1. SLEEP (Alvás) mód: Használja lefekvés előtt vagy szundikáláskor, hogy segítse testét és elméjét a kikapcsolódásban.
2. RELAX mód: Használja stressz, feszültség vagy túlterheltség esetén – bármikor, amikor szüksége van egy kis kikapcsolódásra és megnyugvásra.
3. RELIEF mód: Nyugtató mód, amely enyhíti a fejfájást, és elősegíti a tisztaság és az enyhe könnyedség érzését. Tökéletes azoknak a napoknak, amikor a feje erősnek vagy túlterheltnak érzi magát.
4. MEDIT mód: A tudatosság elősegítésére és az energia szelíd fokozására tervezték. A legjobb eredmény érdekében hangolja össze a légzését az ingerrel: lassan lélegezzen ki, amikor érzi az ingert, és szelíden lélegezzen be a szünetben.

Az intenzitás beállítása a kezelés során

Az intenzitás beállítása:

1. (Szükség esetén) Nyomjon meg bármelyik gombot egyszer a kijelző felébresztéséhez.
2. A „+” és „-” gombokkal lassan állítsa be az intenzitást.

A aurikuláris stimulátor szüneteltetése a kezelés közben

Az aurikuláris stimulátor szüneteltetése:

1. (Szükség esetén) Nyomjon meg bármelyik gombot a kijelző felébresztéséhez.
2. A képernyőn megjelenik a fennmaradó idő.
3. Nyomja meg az alsó középső gombot a kezelés szüneteltetéséhez. Nyomja meg újra a gombot a kezelés folytatásához.

Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelző

A kijelzőn az akkumulátor állapotát egy szokásos akkumulátor ikon jelzi a felső

. Ha az aurikuláris stimulátor akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, a képernyőn megjelenik a „LOW BATTERY” (Alacsony akkumulátor töltöttség) figyelmeztetés.

Környezeti feltételek

Hőmérséklet:

Működés: 5 ~ 40 °C Tárolás:
-10 ~ 45 °C

Relatív páratartalom:

Üzemeltetés: 15% ~ 80% relatív páratartalom
Tárolás: 0% ~ 95% relatív páratartalom

Magasság:

Működés: 600 hPa ~ 1060 hPa
Tárolás: 500 hPa ~ 1060 hPa

Javaslatok:

- Az intenzitást az Ön tűrőképességének és kényelmi szintjének megfelelően kell beállítani, ügyelve arra, hogy ne okozzon fájdalmat. Általában ajánlott, hogy minden kezelés 20 percig tartson, naponta kétszer. A készülék lefekvés előtti használata különösen segít az alvásban.

- Ha az indítás után nem érez semmit, ellenőrizze a füldugó és a füle közötti érintkezést. Ha a fül felülete száraz, permetezzen rá egy kis vizet, vagy használjon gélkefét a füldugóra.
- Ha a bekapcsolás után 3 percig nem történik művelet (a kezelés ideje kivételével), a készülék automatikusan kikapcsol.
- Hagyja abba a használatát, ha szédülést, szédülést, mellkasi fájdalmat vagy túlzott bőrirritációt tapasztal.
- Az alkalmazási helyen jelentkező irritációhoz hasonló reakciók ritkák. Ha irritáció lép fel és kellemetlenné válik, szakítsa meg a kezelést. A kellemetlen érzés a leállítás után röviddel elmúlik. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.

Hibaelhárítás

Probléma	Részletek	Megoldás
A képernyő eltűnt	Az akkumulátor lemerült	Töltse fel, ez órákig is eltarthat
	Automatikus kikapcsolás	Indítsa újra a készüléket
A készülék normálisan működik, de nincs érzékelés	A füldugó nem érintkezik megfelelően a bőrrel	Győződjön meg a kézikönyvben leírtak szerinti megfelelő elhelyezésről
	A kezelés befejeződött	Állítsa vissza a módot a masszázs újraindításához
	A fülüreg tiszta-e	Kérjük, tisztítsa meg a fül környékét
Kellemetlen érzés	Bőrrallergia a füldugóra	Hagyja abba
	Túl magasra van állítva az intenzitás	Csökkentse az intenzitás szintjét
	A kezelés időtartama túl hosszú	Szükség szerint csökkentse a kezelés időtartamát

Karbantartás és ártalmatlanítás

A termék élettartamával és karbantartásával kapcsolatos óvintézkedések

- Kérjük, tárolja a készüléket száraz, szellőző helyen, és kerülje a közvetlen napfényt.
- Az aurikuláris stimulátor nem hosszú távú használatra készült.
- Töltse fel az aurikuláris stimulátort, amint megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző figyelmeztetés.
. Ügyeljen arra, hogy nedvesség ne kerüljön a belső áramkörökbe vagy a készülék csatlakozóiba.
- A mellékelt füldugó újrahasonosítható, de biztonsági okokból azt csak egy személy használhatja.

Ápolás, karbantartás és tárolás

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy az aurikuláris stimulátor ki van kapcsolva.
- Az aurikuláris stimulátor és a füldugó tisztításához óvatosan törölje le őket egy puha ruhával vagy papírkendővel. Használhat enyhén vízzel vagy enyhe szappanos oldatba. Szárazon is letörölheti. Ne áztassa és ne merítse a készüléket vagy a füldugót folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen le, ne törjön össze, és ne merüljön vízbe.
- A tisztításhoz kizárólag szappant vagy vizet használjon; más tisztítószerket ne használjon.
- Ne húzza a vezetékeket a füldugó eltávolításához.
- Tartsa távol az aurikuláris stimulátort a gőztől, víztől vagy más folyadékoktól.
- Az aurikuláris stimulátort biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tárolja.
- Kerülje a készülék túlzott hőhatásnak való kitétségét.
- Ne nyissa ki, ne szerelje szét, és ne próbálja megjavítani vagy módosítani az aurikuláris stimulátort. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Ha a készülék nem

, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

- Tartsa az aurikuláris stimulátort legalább 1 méter távolságra az erős mágneses mezők forrásaitól, például mikrohullámú sütőktől vagy hifi hangszóróktól.
- Az aurikuláris stimulátor nem használható gyúlékony anyagokkal.

A termék ártalmatlanítása

Ha a terméket már nem használja, és ártalmatlanítani kell, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

- Visszavétel a gyártóhoz: Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval, és küldje vissza a terméket vissza a gyártónak újrahasznosítás és megfelelő ártalmatlanítás céljából.
- Saját kezű ártalmatlanítás: A termék ártalmatlanítása előtt győződjön meg arról, hogy az aurikuláris stimulátor ki van kapcsolva, és vegye ki az akkumulátort. Vigye a kivett akkumulátort egy helyi elektronikus hulladék újrahasznosító központba vagy kijelölt újrahasznosító helyre a biztonságos ártalmatlanítás és újrahasznosítás érdekében.

Aurikuláris stimulátor tesztelése

Aurikuláris stimulátor teszteléséhez győződjön meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje legalább egy sávot mutat, majd nyomja meg a bekapcsológombot. A kijelzőnek bekapcsolódnia kell, és a működés során folyamatosan működőképesnek kell maradnia.

A fül dugó tesztelése

Minden kezelés előtt tesztelheti a fül dugót és a vezeték csatlakozását úgy, hogy fokozatosan növeli az intenzitást, amíg bizsergést vagy rezgést nem érez. Az intenzitás növekedésével egyenesen bizsergésnek vagy enyhe rezgésnek kell jelentkeznie. Ha az érzés szabálytalan vagy egyenetlen, előfordulhat, hogy a fül dugó vagy a vezeték meghibásodott. Meghibásodás esetén, vagy ha a fül dugó nem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal segítségért.

Segíthetünk

Örülünk, hogy csatlakozott a ZENOWELL aurikuláris stimulátorok családjához, és szívesen segítünk, ha szüksége van ránk. Ha bármilyen kérdése van, használja ezt a linket, hogy könnyedén kereshessen válaszokat a Súgóban. Ha nem találja a keresett választ, bátran lépjen kapcsolatba velünk [a](mailto:support@zenowell.ai) www.zenowell.ai címen.

ZENOWELL LIMITED

Cím: OFFICE UNIT B ON 9/F THOMSON COMM BLDG 8 THOMSON RD WAN CHAI HONG KONG
support@zenowell.ai [támogatás és kérdések]

Garanciális információk

Aurikuláris stimulátor ONE (1) év korlátozott jótállás

Az aurikuláris stimulátor garanciát vállal az aurikuláris stimulátor márkájú hardvertermékre („Auricular Massage Device”) az anyag- és gyártási hibákra vonatkozóan, amennyiben azt az aurikuláris stimulátor által közzétett útmutatásoknak megfelelően használják, a végfelhasználó által történő eredeti kiskereskedelmi vásárlás napjától számított EGY (1) ÉVIG („Garanciális időszak”). A közzétett útmutatók magukban foglalják, de nem korlátozódnak a műszaki specifikációkban, a biztonsági utasításokban vagy a gyors útmutatóban található információkra. Az aurikuláris stimulátor nem garantálja, hogy a készülék működése megszakításmentes vagy hibamentes lesz.

Az aurikuláris stimulátor nem vállal felelősséget az eszköz használatával kapcsolatos utasítások be nem tartásából eredő károkért.

A jótállás nem terjed ki az alábbiakra:

- A rendellenes vagy helytelen használatból, gondatlanságból, gondosság hiányából vagy véletlen károsodásból (pl. horpadások) eredő károk.
- Bármilyen közvetett kár.